

Pilulier semainier Medi-7, blanc.



- Dimensions : 12,5 x 5 x 11,5 cm.
- Pilulier aidant à prendre en temps et en heure les médicaments prescrits par le médecin.
- Pour remplir le pilulier, sortir les 7 casiers journaliers de la boîte et faire glisser les couvercles transparents vers la droite jusqu'à la butée afin de libérer les compartiments "matin", "midi" et "soir".
- Pour libérer le compartiment "nuit", faire glisser le couvercle transparent vers la gauche.
- Sortir les médicaments de leur boîte d'origine et remplir les compartiments respectifs.
- Placer en première position du boîtier-doseur le casier rempli, correspondants au jour actuel. Ordonner ensuite les casiers correspondant aux jours suivants en les faisant glisser un à un de l'arrière vers l'avant.
- Entretien: nettoyer dans l'eau chaude avec liquide vaisselle usuel.

