

## B.5 MEPILEX PANSEMENT ABS. MOUSSE 20X20 CM-S



Mepilex Pansement Mousse Siliconé Absorbant Stérile  
Pansement absorbant en mousse de silicone pour les plaies hydratantes superficielles en phase rouge et jaune, telles que l'ulcus cruris (également en combinaison avec des bandages compressifs), les escarres, les plaies oncologiques et les brûlures.

Le coussin en mousse Mepilex absorbe l'humidité de la plaie et minimise le risque de ramollissement des bords de la plaie.

Les fuites au sommet sont évitées car cette couche est pourvue d'une couche de film imperméable aux bactéries et aux liquides.

Cette couche crée un environnement humide pour la plaie, propice à la cicatrisation.

Mepilex peut rester sur place pendant plusieurs jours.

En raison de la couche de silicone hydrophobe, Mepilex ne

colle pas à la plaie, mais uniquement sur une peau saine et sèche.

Cela garantit des changements de pansements sans douleur et un processus de guérison ininterrompu.

Nettoyez la plaie selon la procédure applicable.

Assurez-vous que la zone autour de la plaie est sèche.

Retirer le papier protecteur et appliquer le pansement

avec la face adhésive tournée vers la plaie, en chevauchant au moins 2 cm sur la peau saine.

Coupez à la taille si nécessaire.

Si nécessaire, fixer avec un bandage ou un autre pansement de fixation.

Le pansement peut rester sur la plaie pendant plusieurs jours en fonction de l'état de la plaie et de la peau environnante.