

Koud/warm kompres, 21 x 38 cm - Zonder hoes

- Deze kompressen kunnen in de volgende therapeutische domeinen gebruikt worden : physiotherapie, dentale zorg, orthopedie, eerste zorgen, sportgeneeskunde, gynecologie, post-operatoire therapie, ...
 - Niet gebruiken bij patiënten met bloedcirculatieproblemen en patiënten met het syndroom van Raynaud.
 - Voordelen : Zeer lange levensduur, gemakkelijk te gebruiken, zowel thuis als in het ziekenhuis
 - Voor gebruik als koude kompres : ong. 2 uur in de diepvriezer stoppen (-18c°)
 - Het wordt aangeraden de kompressen in de diepvries te bewaren, klaar voor gebruik.
- Voor gebruik als warme kompres : het kompres opwarmen in warm water van max. 85c° (max.) of in de microgolf oven (3 min bij 280 watt)
- Het kompres controleren tijdens het opwarmen.
 - Het wordt aangeraden het kompres goed te kneden voor gebruik, om een gelijkmatige warmteverdeling te bekomen.