

D.5 MEPILEX ABS. SCHUIMVERBAND 20X20 CM-S



Absorberend siliconen schuimverband voor oppervlakkige vochtafgevendende wonden in de rode en de gele fase, zoals ulcus cruris (ook samen met compressieverbanden), doorligwonden, oncologische wonden en brandwonden. Het schuimkussen Mepilex neemt wondvocht op en beperkt maximaal het risico op verweking van de wondranden.

Doorlekken aan de bovenzijde wordt voorkomen doordat deze laag voorzien is van een filmlaag die ondoordringbaar is voor bacteriën en vloeistoffen. Deze laag creëert een vochtig wondmilieu, hetgeen bevorderlijk is voor de wondgenezing.

Mepilex kan meerdere dagen ter plaatse blijven. Door de hydrofobe siliconenlaag kleeft Mepilex niet aan de wonde, maar enkel op de gezonde droge huid.

Dit verzekert pijnloze verbandwisselingen en een ononderbroken genezingsproces.

Reinig de wonde volgens de daarvoor geldende procedure.

Zorg daarbij dat het gebied rondom de wonde droog is. Verwijder het bescherm papier en breng het verband met de klevende zijde naar de wonde toe aan, overlap minimaal 2 cm op de gezonde huid.

Indien nodig op maat knippen.

Indien nodig fixeren met een zwachtel of een ander fixatieverband.

Het verband kan meerdere dagen op de wonde blijven afhankelijk van de conditie van de wonde en van de omliggende huid.